

REGENAMEL®

Спрямована регенерація емалі (GER) для лікування початкових каріозних уражень.

Склад

Один аплікатор REGENAMEL® містить технологію CUROLOX® для спрямованої регенерації емалі та воду для активації.

Властивості / Дія

REGENAMEL® наноситься безпосередньо на поверхню каріозного ураження в початковій стадії. Після дифузії в осередок ураження, матриця CUROLOX® запускає регенерацію емалі, індуюючи зростання нових кристалів гідроксиапатиту шляхом зв'язування іонів кальцію і фосфату з слини. Цей процес спрямованої регенерації емалі відновлює первинний склад твердих тканин зубів.

Показання до застосування

REGENAMEL® рекомендований для біоміметичної мінералізації початкових каріозних уражень (апроксимальних, букальних, оклюзійних) і подібних дефектів.


Інструкція по застосуванню

При використанні REGENAMEL® необхідно дотримуватися загальних принципів лікування пацієнтів і медикаментозної терапії.

Підготовка

- Професійна стоматологічна чистка зубів
- Видаліть біоплівку з використанням **2% гіпохлориту натрію протягом 20 секунд**
- Видаліть неорганічні відкладення з використанням **35% фосфорної кислоти протягом 20 секунд**
- Промийте поверхню зуба водою
- Висушіть поверхню зуба

Нанесення

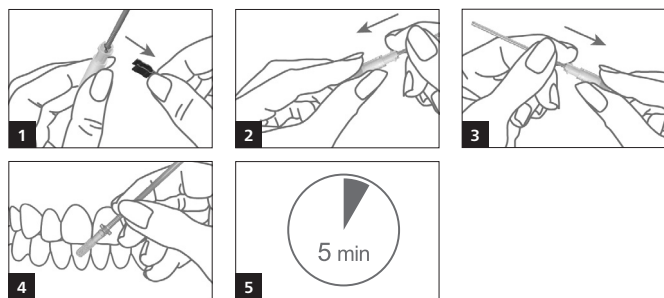

1. Зніміть запобіжний затискач (чорний)
2. Активуйте аплікатор REGENAMEL®, зсунувши два циліндра разом
3. Вийміть аплікатор REGENAMEL® з захисної упаковки
4. Нанесіть REGENAMEL®, видавивши вміст губки над каріозним ураженням / апроксимальним проміжком
5. Залиште розчин для дифузії на 5 хвилин. Після використання утилізуйте аплікатор. Аплікатор призначений лише для одноразового використання!

Обмеження щодо використання

Протипоказання: відсутні

Запобіжні заходи

- REGENAMEL® призначений для використання тільки професійними стоматологами
- Спрямована регенерація емалі при неактивних початкових каріозних ураженнях може призвести тільки до мінералізації у поверхневому шарі
- Повторне використання REGENAMEL® приблизно через 12 тижнів може покращити процес направленої регенерації емалі і результат лікування
- Лаки, що містять фтор, можна наносити через п'ять хвилин після обробки REGENAMEL®. Застосування лаку безпосередньо перед обробкою REGENAMEL® протипоказано, тому що це пригнічує утворення матриці CUROLOX®
- Пацієнт повинен дотримуватися хорошої гігієни порожнини рота після лікування
- Пацієнтам з низьким слиновиділенням / ксеростомією слід використовувати додаткові засоби для підвищення слиновиділення

Побічні ефекти

До сих пір не спостерігалось жодних побічних ефектів при застосуванні REGENAMEL®. Тим не менш, вони не можуть бути повністю виключені. Як і в разі інших стоматологічних процедур, може виникнути місцеве запалення або тимчасова гіперчутливість.

Вагітність / лактація

Відсутні дані про використання цього продукту під час вагітності та годування груддю. Тому застосування REGENAMEL® вагітним і жінкам, що годують, не рекомендовано.

Різне

- Один аплікатор REGENAMEL® призначений для одноразового використання
- Зберігати в сухому місці
- Не застосовувати, якщо упаковка пошкоджена
- Зберігати при температурі, що не перевищує 25 °C
- Використовувати згідно інструкції
- Не застосовувати після закінчення зазначеного терміну придатності
- REF** Номер заказу
- LOT** Номер партії
- CE** REGENAMEL® має маркування EC NB 1250

Розмір упаковки

10 аплікаторів REGENAMEL® в одній коробці

Дата останньої редакції даних

Червень 2017 р.

Виробник

Dr. Wild & Co. AG
Хофакерштрассе 8, CH-4132
Муттенц, ШВЕЙЦАРІЯ
www.wild-dental.com
info@wild-dental.com

Офіційний представник в Україні

ТОВ Свісс-Трейд,
01010, Київ, Бутишев пров. 14,
тел.: 0 800 500 362,
www.swisstrade.com.ua

REGENAMEL®

Направленная регенерация эмали (GER) для лечения начальных кариозных поражений.

Состав

Один аппликатор REGENAMEL® содержит технологию CUROLOX® для направленной регенерации эмали и воду для активации.

Свойства / Действие

REGENAMEL® наносится непосредственно на поверхность кариозного поражения в начальной стадии. После диффузии в очаг поражения, матрица CUROLOX® запускает регенерацию эмали, индуцируя рост новых кристаллов гидроксиапатита путем связывания ионов кальция и фосфата из слюны. Этот процесс направленной регенерации эмали восстанавливает первоначальный состав твердых тканей зубов.

Показания к применению

REGENAMEL® рекомендован для биомиметической минерализации начальных кариозных поражений (апроксимальных, буккальных, окклюзионных) и подобных дефектах.


Инструкция по применению

При использовании REGENAMEL® необходимо соблюдать общие принципы лечения пациентов и медикаментозной терапии.

Подготовка

- Профессиональная стоматологическая чистка зубов
- Удалите биопленку с использованием **2% гипохлорита натрия в течении 20 секунд**
- Удалите неорганические отложения с использованием **35% фосфорной кислоты в течении 20 секунд**
- Промойте поверхность зуба водой
- Высушите поверхность зуба

Нанесение

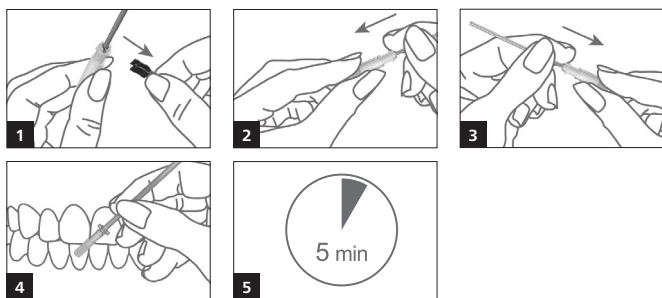

- Снимите предохранительный зажим (черный)
- Активируйте аппликатор REGENAMEL®, сдвинув два цилиндра вместе
- Извлеките аппликатор REGENAMEL® из защитной упаковки
- Нанесите REGENAMEL®, выдавив содержимое губки над кариозным поражением / апроксимальным промежутком
- Оставьте раствор для диффузии на 5 минут. После использования утилизируйте аппликатор. Аппликатор предназначен только для одноразового использования!

Ограничения по использованию

Противопоказания: отсутствуют

Меры предосторожности

- REGENAMEL® предназначен для использования только профессиональными стоматологами
- Направленная регенерация эмали при неактивных начальных кариозных поражениях может привести только к минерализации в поверхностном слое
- Повторное использование REGENAMEL® примерно через 12 недель может улучшить процесс направленной регенерации эмали и результат лечения
- Фторсодержащие лаки можно наносить через пять минут **после обработки** REGENAMEL®. Применение лака непосредственно перед обработкой REGENAMEL® противопоказано, так как это ингибирует образование матрицы CUROLOX®
- Пациент должен соблюдать хорошую гигиену полости рта после лечения
- Пациентам с низким слюноотделением / ксеростомией следует использовать дополнительные средства для повышения слюноотделения

Побочные эффекты

До сих пор не наблюдалось никаких побочных эффектов при применении REGENAMEL®. Тем не менее, они не могут быть полностью исключены. Как и в случае других стоматологических процедур, может возникнуть местное воспаление или временная гиперчувствительность.

Беременность / лактация

Отсутствуют данные об использовании этого продукта во время беременности и кормления грудью. Поэтому применение REGENAMEL® беременным и кормящим женщинам не рекомендовано.

Разное

- Один аппликатор REGENAMEL® предназначен для одноразового использования
- Хранить в сухом месте
- Не использовать, если упаковка повреждена
- Хранить при температуре, не превышающей 25 °C
- Использовать согласно инструкции
- Не использовать после истечения указанного срока годности
- REF** Номер заказа
- LOT** Номер партии
- CE** REGENAMEL® имеет маркировку EC NB 1250

Размер упаковки

10 аппликаторов REGENAMEL® в одной коробке

Дата последней редакции данных

Июнь 2017 г.

Производитель

Dr. Wild & Co. AG
Хофакерштрассе 8, CH-4132
Муттенц, ШВЕЙЦАРИЯ
www.wild-dental.com
info@wild-dental.com

Официальный

представитель в Украине

ООО Свисс-Трейд,
01010, Киев, Бутишев пер. 14,
тел.: 0 800 500 362,
www.swisstrade.com.ua